

## **Центрифуга медицинская лабораторная 6/4000**

# **Инструкция по снятию транспортной защиты**

1. Аккуратно достаньте центрифугу из коробки, освободите от пенополистирольных ложементов и полиэтиленовой упаковки. **Внимание: за крышку не поднимать!!!**
2. Установите центрифугу на стол.
3. Если до установки центрифуга долгое время находилась при температуре, отличной от комнатной – оставьте её на 3 часа при комнатной температуре во избежание образования конденсата на внутренних поверхностях и электронных компонентах.
4. Убедитесь, что кнопка питания находится в положении «выключено». Достаньте шнур питания и подключите центрифугу к сети, предварительно убедившись, что напряжение сети соответствует указанному напряжению на табличке на задней поверхности центрифуги.
5. Включите кнопку питания в положение «включено».
6. Нажмите клавишу «open» на передней панели центрифуги.
7. После щелчка откройте крышку центрифуги.
8. Достаньте из корзины центрифуги ротор и другие аксессуары.
9. Вытащите из корзины уплотнительную пенополистирольную вкладку.
10. Установите ротор согласно указаниям в инструкции по эксплуатации

**Спасибо за то, что Вы выбрали нашу продукцию!**

**Желаем Вам удачной эксплуатации!**

ООО «Хоспитекс Диагностикс», г. Москва, ул. Коцюбинского, д.4, тел. +7 (495) 6460505,  
электронный адрес [hospitex@hospitex.ru](mailto:hospitex@hospitex.ru)